



Wyniki analizy możesz odebrać online po około 1-2 tygodniach na stronie:

<https://norsan-omega.pl/analiza-wyniki/>

Chętnie udzielimy Ci indywidualnej porady i wyjaśnimy wyniki analizy.

Wyślij nam e-mail na adres:

 info@norsan-omega.pl

lub zadzwoń do nas na numer:

 +48 793 556 369

NORSAN Polska Sp. z o. o.
ul. Szczawiowa 54 D,F
70-010 Szczecin, Poland
tel: +48 793 556 369

www.norsan-omega.pl

Ważne od: 06.2025

NORSAN

Analiza kwasów tłuszczowych NORSAN

oferuje możliwość pomiaru indywidualnego stanu zaopatrzenia w organizmie. Analizowany jest wzór kwasów tłuszczowych w błonie erytrocytów. (Pomiar długoterminowy) Test dostarcza informacji o zaopatrzeniu w ciągu ostatnich 120 dni. Mierzy się łącznie 26 kwasów tłuszczowych, co odpowiada ponad 99% wszystkich, ważnych kwasów tłuszczowych w organizmie. Oprócz indywidualnych wartości kwasów tłuszczowych, analiza dostarcza informacji o stosunku omega-6:3 i indeksie HS Omega-3. Indeks HS Omega-3 jest bardzo pouczający w profilaktyce i leczeniu chorób (choroby serca i przewlekłe choroby zapalne). Analiza jest przeprowadzana zgodnie ze znormalizowaną i sprawdzoną pod względem jakości procedurą w wiodącym niezależnym specjalistycznym laboratorium.

Ważne informacje:

- Zestaw do analizy kwasów tłuszczowych i pobierania krwi powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.
- Analiza kwasów tłuszczowych powinna być wykonywana u dzieci wyłącznie w obecności nadzorującego dorosłego, powyżej 18 roku życia.
- Zestaw do pobierania krwi należy stosować tylko raz.
- Jeśli masz skłonności do krwawienia lub jesteś w ciąży lub karmisz piersią, skonsultuj się wcześniej z lekarzem lub terapeutą.
- Jeśli nie możesz wykonać testu samodzielnie, wykonaj pobranie krwi wyłącznie w obecności innej osoby lub skonsultuj się z lekarzem lub terapeutą.
- Skonsultuj się z lekarzem i z nami, jeśli cierpisz na chorobę przenoszoną drogą krwi.

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK KRWI

ANALIZA KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Zestaw do analizy zawiera:

- 2x BD Microtainer® Lancety aktywowane kontaktowo CE (nr art. 366594)
- 1x woreczek foliowy z pochłaniaczem wilgoci
- 1x karta testowa HS-Card CE (nr art. HSC01)
- 1x plaster
- 1x koperta zwrotna
- 1x instrukcja pobierania krwi
- 1x arkusz kontaktowy

NORSAN



Zgodność europejska



„Zielony Punkt – System Podwójny Niemcy (DSD) Sp. z o.o.”



In-vitro-Produkt



Do jednorazowego użycia



Przechowywać między 2 i 30 stopni celjusza

Opakowanie
Klucz do symboli


Przed kontynuowaniem prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami i instrukcjami.

Przygotowanie:

- Próbkę krwi należy pobrać na czczo (co najmniej 10 godzin).
- Umieść cały sprzęt na czystej powierzchni przed sobą.
- Najlepszym miejscem nakłucia jest środkowy lub serdeczny palec lewej ręki. Jeśli jesteś leworęczny, użyj prawej ręki.



1 Proszę umyć ręce mydłem i ciepłą wodą i dokładnie je osuszyć. To rozszerzy naczynia krwionośne i zwiększy przepływ krwi.

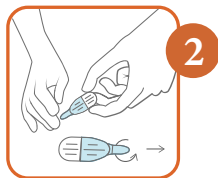

2 Zdejmij lancet i osłonkę igły, delikatnie przekręcając i ciągnąc (igła zostanie zwolniona tylko wtedy, gdy na palec zostanie wywarty nacisk). Nie używaj lancetu, jeśli osłonka ochronna jest brakująca lub jest już poluzowana.



3 Umieść lancet z boku opuszka palca (patrz rys. 3) i mocno dociśnij palec, aż igła się wysunie (igła schowa się automatycznie). Używaj lancetu tylko raz.




4 Weź palec, w którym znajduje się miejsce nakłucia, między kciuk i palec wskazujący drugiej ręki i delikatnie naciśnij go od wnętrza dłoni do czubka palca, tak aby powstała kropla krwi.




Ważne: Twój palec nie może dotykać papieru testowego!

5 Proszę pozwolić, aby krew kapłała na oznaczone obszary próbki karty testowej, aż zostaną wypełnione.

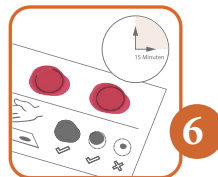

6 Pozostaw kartę testową do wyschnięcia na powietrzu przez około **15 minut**.

7 W międzyczasie użyj platra, aby zakleić miejsce nakłucia.

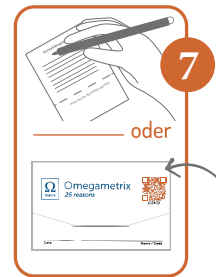

7 Wypełnij formularz kontaktowy swoimi danymi i usuń dolną sekcję formularza, aby uzyskać dostęp do wyników kwasów tłuszczowych. Możesz także zarejestrować swój test online, używając kodu QR na karcie testu i przesłać swoje dane bezpośrednio do laboratorium. (wejdź na: <https://lab.omegаметrix.eu/> w prawym górnym roku znajdziesz polską flagę). Eliminuje to konieczność wypełniania i przysyłania formularza kontaktowego.



8 Umieść wysuszoną kartę testową i środek pochłaniający wilgoć w foliowym woreczku i szczelnie zamknij.



9 Umieść woreczek foliowy zawierający próbkę (oraz arkusz kontaktowy, jeśli dotyczy) w opłaconej kopercie zwrotnej, zaklej ją i wyślij wg. instrukcji na stronie <https://norsan-omega.pl/index-omega-3-pomiar/>